

# Стопа Слалом Ски. SKI



Вес пациента до 114кг  
Уровень активности K3-K4

- Первая в мире стопа, позволяющая надеть лыжу непосредственно на протез, просто вставив стопу в обычные горнолыжные крепления для ботинок.
- Отсутствует необходимость в специальном ботинке.
- Обеспечивает необходимые гибкость и поглощение ударов на соответствующих скоростях.
- Пациент теперь может проводить существенно больше времени, катаясь на горных лыжах. Вес стопы соответствует весу ботинка для равномерного распределения нагрузки.
- Пирамидальный адаптер уже интегрирован под необходимым углом для катания так, что сборку протеза менять не надо - достаточно сменить стопу.

## Спецификация:

Основной индекс: SKI

Вес пациента: до 114кг

Соединение: пирамидальный адаптер

Срок изготовления: 14 дней


Гарантия: 1 год

## Выбор категории жесткости

Категория	Вес, кг
11	44-72
12	73-90
13	91-114

## Артикул стопы



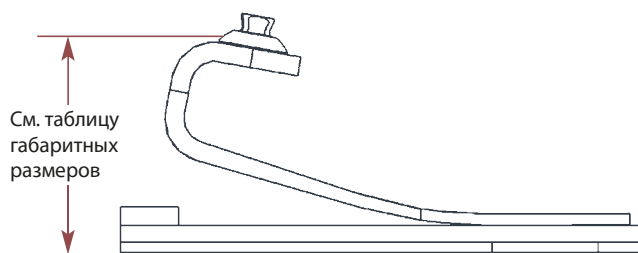

## Габаритные размеры

Размер, см	Высота, мм	Вес, г
на заказ	140	1055

*Измерения усреднены и могут варьироваться в зависимости от категории жесткости*

## Как получить необходимый размер стопы:

### При односторонней ампутации:

- Предпочтительный метод:  
Измерьте длину ботинка на здоровой ноге в см, от края пятки до края носка
- Другой способ:  
Измерьте длину горнолыжного крепления в см

### При двусторонней ампутации:

- Измерьте длину горнолыжного крепления в см

### Важно!

Стопа Slalom Ski сделана в соответствии со стандартом DIN (под стандарт изготовления горнолыжных креплений). В случае, если пациент использует иные нестандартные крепления, просим обратиться к локальному дистрибьютеру.